






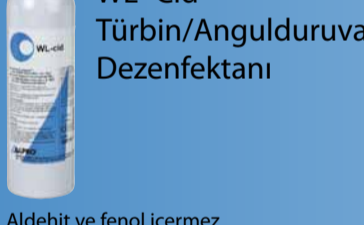
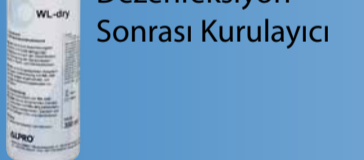
TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON ve EL BAKIMI

 <p>AlproSept – HD E El Dezenfektanı</p> <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Hızlı ve etkili, hijyen ve cerrahi amaçlı el dezenfeksiyonu sıvısıdır. RKI kurallarına uygundur. Cilt dezenfeksiyonu için; injeksiyon, pikür, kan alma ve iğne yapma öncesinde özellikle cilt ile uyumludur. (alarjik reaksiyonu yoktur)</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakterisidal (TBC dahil) • Fungisidal • Virüsidal (HBV, HCV, HIV dahil) • VAH/DGDM tarafından sertifikalıdır 	<p>Uygulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulandırılmadan, direk kullanılır • Hijyenik el dezenfeksiyonu için; 3-5 ml dezenfektanı elinize alınız ve 30 sn süreyle uygulayınız ve kuruyana kadar ovalamaya devam ediniz. • Cerrahi el dezenfeksiyonu için; her bir elinize 3-5 ml dezenfektan alınız ve dirseklere kadar 5 dk süreyle uygulayınız. Daha sonra kuruyana kadar ovmaya devam ediniz. (alkol buharlaşacaktır)
 <p>AlproSept – HDE Jel El Dezenfektanı</p> <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Hijyenik ve cerrahi amaçlı el dezenfeksiyonudur. Enjeksiyon uygulaması ve periferik vesile pikür uygulaması öncesi cilt dezenfeksiyonu için uygundur. AlproSept-HDE jel özellikle kütanöz toleransı için uygundur.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakterisidal (TBC dahil) • Fungisidal • Virüsidal (HBV, HCV, HIV dahil) • VAH/DGDM tarafından sertifikalıdır ve EN ye uygundur. 	<p>Uygulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hijyenik amaçlı el dezenfeksiyonu için; 3-5 ml jeli 30 sn süreyle ellere uygulayınız. TB' ye önlem olarak iki sefer uygulayın ve nemli tutun. • Cerrahi amaçlı el dezenfeksiyonu için; her bir elinize 3-5 ml jeli dirseklere kadar 5 dk süreyle uygulayın ve nemli tutun. • AlproSept-HDE jel ile iyice emdirilmiş selülozlu mendilli ezenfekte etmek istediğiniz bölgeye uygulayınız.


YÜZEY TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

<p>MinutenSpray Classic Yüze Dezenfektanı</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Kullanıma hazır hızlı yüze dezenfektanıdır. Aletler, angulduruva, türbin ünüt tutaçları ve tedavi tablaları dahil medikal/Dental cihazların yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • TBC dahil bakterisidal • Fungisidal • Virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV, influenza gribi, bununla beraber Adeno gibi sarılı olmayan virüs türleri dahil) • Rimanans ile /koruma (kuruduktan sonra yeni mikrobik rekontomasyonda redüksiyon sağlar) • VAH/DGDM tarafından sertifikalıdır ve EN ye uygundur. 	<p>Uygulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yüzeyleri ve objeleri gerektiği kadar dezenfektan püskürtünüz (sılatınız). 30 cm uzaktan uygulayınız ve dezenfektanın etki etmesini bekleyiniz. Ardından tek kullanımlık bir bez ile (örn. MinutenWipes/CidWipes) siliniz. Sadece alkol uyumlu yüzeylerde kullanınız. <p>Kontakt Süreleri</p> <table border="1"> <tr><td>• Bactericidal (TBC dahil)/fungisidal</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• Virüsidal HBV/HIV</td><td>30 sn</td></tr> <tr><td>• HCV/BVDV</td><td>30 sn</td></tr> <tr><td>• Vaccinia</td><td>30 sn</td></tr> <tr><td>• Adeno</td><td>2 dk</td></tr> </table>	• Bactericidal (TBC dahil)/fungisidal	1 dk	• Virüsidal HBV/HIV	30 sn	• HCV/BVDV	30 sn	• Vaccinia	30 sn	• Adeno	2 dk
• Bactericidal (TBC dahil)/fungisidal	1 dk												
• Virüsidal HBV/HIV	30 sn												
• HCV/BVDV	30 sn												
• Vaccinia	30 sn												
• Adeno	2 dk												
<p>ClearSept Yüze Dezenfektanı</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Kullanıma hazır alkollü yüze dezenfektanıdır. Medikal cihazların (el parçaları, angulduruva, türbin, alet tablası, ünüt tutaçları gibi) yüze temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCB dahil bakterisidal • Fungisidal • RKI ya uygun olarak virüsidal (HBV, HCV, HIV dahil) • EN-Standartlarına göre Medikal alanda yüze temizliğinde kullanıma uygundur. 	<p>Uygulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yüzeyleri ve objeleri gerektiği kadar dezenfektan püskürtünüz (sılatınız). 30 cm uzaktan uygulayınız ve dezenfektanın etki etmesini bekleyiniz. Ardından tek kullanımlık bir bez ile (örn. MinutenWipes/CidWipes) siliniz. Sadece alkol uyumlu yüzeylerde kullanınız. <p>Kontakt Süreleri</p> <table border="1"> <tr><td>• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• Virüsidal HBV/HIV</td><td>30 sn</td></tr> <tr><td>• HCV/HVDV</td><td>30 sn</td></tr> <tr><td>• Vaccinia</td><td>30 sn</td></tr> </table>	• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal	1 dk	• Virüsidal HBV/HIV	30 sn	• HCV/HVDV	30 sn	• Vaccinia	30 sn		
• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal	1 dk												
• Virüsidal HBV/HIV	30 sn												
• HCV/HVDV	30 sn												
• Vaccinia	30 sn												
<p>MinutenWipes Yüze Dezenfeksiyon Mendili</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Angulduruvalar, aletler, türbinler ünüt tutaçları, alet tepsilere gibi Medikal cihazlarda (hızlı aksiyon almaya yarayan, aldehistsiz, dezenfeksiyon mendilleridir.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • TBC dahil bakterisidal • Fungisidal • RKI ya göre virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV, enfluenza ve Adone gibi sarılı olmayan virüsler dahil) • Rimanans ile /koruma (kuruduktan sonra yeni mikrobik rekontomasyonda redüksiyon sağlar) • VAH/DGDM tarafından sertifikalıdır ve EN ye uygundur. 	<p>Kontakt Süreleri</p> <table border="1"> <tr><td>• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• Virüsidal HBV/HIV</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• HCV/BVDV</td><td>30 sn</td></tr> <tr><td>• Vaccinia</td><td>30 sn</td></tr> <tr><td>• Adeno</td><td>2 dk</td></tr> </table>	• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal	1 dk	• Virüsidal HBV/HIV	1 dk	• HCV/BVDV	30 sn	• Vaccinia	30 sn	• Adeno	2 dk
• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal	1 dk												
• Virüsidal HBV/HIV	1 dk												
• HCV/BVDV	30 sn												
• Vaccinia	30 sn												
• Adeno	2 dk												
<p>PlastiSept Hassas Yüze Dezenfektanı</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Aldehit ve fenol içermeyen alkolsüz yüze dezenfektanıdır. Özellikle alkola hassas olan medikal cihazlar, tedavi ünütleri için tavsiye edilmektedir.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakterisidal • Fungisidal • RKI ya göre virüsidal (HBV, HCV, HIV, enfluenza vb. dahil) • Rimanans ile /koruma (kuruduktan sonra yeni mikrobik rekontomasyonda redüksiyon sağlar) • VAH/DGDM tarafından sertifikalıdır ve EN ye uygundur. 	<p>Uygulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yüzeyleri ve objeleri gerektiği kadar dezenfektan püskürtünüz (sılatınız). Dezenfektanın etki etmesini bekleyiniz. Ardından tek kullanımlık bir bez ile siliniz. <p>Kontakt Süreleri</p> <table border="1"> <tr><td>• Bakterisidal/Fungisidal</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• Virüsidal HBV/HIV</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• HCV/BVDV</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• Vaccinia</td><td>1 dk</td></tr> </table>	• Bakterisidal/Fungisidal	1 dk	• Virüsidal HBV/HIV	1 dk	• HCV/BVDV	1 dk	• Vaccinia	1 dk		
• Bakterisidal/Fungisidal	1 dk												
• Virüsidal HBV/HIV	1 dk												
• HCV/BVDV	1 dk												
• Vaccinia	1 dk												
<p>DesNet Plus Yer Dezenfektanı</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Medikal alanlar ve Dental kliniklerde yıkanabilir yüzeyler için konsantre yüze dezenfektanıdır. Geniş mikribisidal etkinliği ve etkinlik süresine sahiptir.</p>	<p>Konsantrasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genel hijyen ve temizlik (sarılı virüsler dahil) 0,5 – 2.0% / 15 dk/60 dk • Kritik Bölge (örn. Operasyon odası), kapsamlı etki için (sarılı ve sarılı olmayan virüsler) 5,0% / 15 dk – 30 dk 	<p>Çevre Uyumluluğu</p> <ul style="list-style-type: none"> • DesNet Plus solüsyonu ekolojik olarak zararsızdır. OECD –screening – teslerine uygun olarak kolayca biyolojik olarak parçalanabilir. 										

ALET DEZENFEKSİYONU ve TEMİZLİĞİ

<p>BIB Forte Alet ve Frez Dezenfektanı</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Medikal aletlerin ve döner aletlerin (frezeler) dezenfeksiyonu ve temizliğinde kullanılan konsantre dezenfeksiyon sıvısıdır. Ayrıca endoskoplar için de uygundur.</p> <p>Komet Gebr. Brasseler, Busch, DENTSPLY Maillefer, VDW, HenkeSass, Wolf, KARL STORZ, ELMA ve FUJINON Corporation/JAPAN tarafından onaylanmış, SS White tarafından tavsiye edilmektedir.</p> <p>Çevre Uyumluluğu</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIB forte aldehit ve fenol içermez, yüksek etkinlik sağlar, güvenli uygulama ve etkinlik sağlar.(uygulamada %1-4 arası kullanılır) Alkalis, klor hidrokarbon ve halojen içermez. 	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakterisidal (TBC dahil) • Fungisidal • RKI ya göre virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV, ayrıca Vaccinia ve Polio gibi sarılı olmayan virüsler dahil) • VAH/dghm SERTİFİKALIDIR. • EN standartlarına uygundur. • AFNOR NF T 72-170, t 72-300 <p>Kullanım Ömrü</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal kontaminasyonda 1 hafta Uyumluluk • BIB Forte dikkatle ayarlanmış fomülü sayesinde harkulade korozyonu önleyiciliğe sahiptir, bundan dolayı korozyona hassas frez ve aletlerde soruna neden olmaz. 	<p>Uygulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temizlik ve dezenfeksiyon için yüksek dercede verimli likit konsantre 1. Dental döner aletler (çelik ve hard frezler, elmas frezler, cerrahi deliciler ve carbide frezler, kron kesiciler, kök kanal aletleri vb) 2. Genel Dental ve medikal aletler (diyagnoz, koruma ve cerrahi aletler, periodontoloji aletleri, davyeler, elavatörler, ağız aynaları, sert ve esnek endoskoplar, vb) BIB Forte Ultrasonik cihazlarla kullanıma uygundur. <p>Konsantrasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakterisidal (TBC dahil), fungisidal: <table border="1"> <tr><td>Verimli</td><td>%1</td><td>60 dk</td></tr> <tr><td>Hızlı</td><td>%2</td><td>5 dk (ultrasonik cihazda)</td></tr> <tr><td></td><td>%3</td><td>30 dk</td></tr> <tr><td></td><td>%4</td><td>15 dk</td></tr> <tr><td>Virüsidal: HBV, HIV</td><td>%1</td><td>15 dk</td></tr> <tr><td></td><td>%2</td><td>5 dk</td></tr> <tr><td>HCV/BVDV</td><td>%1</td><td>5 dk</td></tr> <tr><td>Vaccinia</td><td>%1</td><td>15 dk</td></tr> <tr><td>Polio</td><td>%4</td><td>5 dk (ultrasonik cihazda 50 ° Cde)</td></tr> </table>	Verimli	%1	60 dk	Hızlı	%2	5 dk (ultrasonik cihazda)		%3	30 dk		%4	15 dk	Virüsidal: HBV, HIV	%1	15 dk		%2	5 dk	HCV/BVDV	%1	5 dk	Vaccinia	%1	15 dk	Polio	%4	5 dk (ultrasonik cihazda 50 ° Cde)
Verimli	%1	60 dk																												
Hızlı	%2	5 dk (ultrasonik cihazda)																												
	%3	30 dk																												
	%4	15 dk																												
Virüsidal: HBV, HIV	%1	15 dk																												
	%2	5 dk																												
HCV/BVDV	%1	5 dk																												
Vaccinia	%1	15 dk																												
Polio	%4	5 dk (ultrasonik cihazda 50 ° Cde)																												
<p>WL- Cid Türbin/Angulduruva Dezenfektanı</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Türbin ve angulduruva gibi aletlerin sterilizasyon öncesi iç temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılan üniversal solüsyondur. W&H, SIRONA, Dentsystems Bensheim, SciCan Augsberg, NSK Europe tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCB dahil bakterisidal • Fungisidal • Virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV enfluenza dahil) • VAH/DGDM tarafından onaylıdır 	<p>Uygulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Her tedavi sonrasında 3-5 saniye spreyi kanallara uygulayınız. 1-2 dk etkinliği için bekleyiniz. Daha sonra WL-dry ile kurulayınız ve yağ ile bakımı yapınız. 																											
<p>WL- Dry Dezenfeksiyon Sonrası Kurulayıcı</p> 	<p>Türbin ve angulduruvaların dezenfeksiyon sonrasında çabuk kuruması için sprejdir. WL-clean/WL-cid veya lubricant kullanımından sonra kullanılır. W&H, Bürmoos, SIRONA, SciCan, NSK tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurulama 	<p>Uygulama</p> <p>Temizleme ajanları ve bakım ürünlerinin atıklarının çıkarılması vemetizlenmesi</p> <p>Dosaj</p> <ul style="list-style-type: none"> • WL-clean/WL-cid kullanımı sonrasında 3 sn süresince spray uygulayınız. Daha sonra bakım yağı uygulayınız. 																											

ASPIRASYON

<p>AlproJet-W Aspirasyon Temizlik Konsantresi Haftalık</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Dental aspirasyon ve separatörleri için, yüksek etkili aldehit ve köpük içermeyen likit konsantre kontra temizlik ve bakım sıvısıdır.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <p>Temizlik ve dezenfeksiyon (Alprojet DD ile konsantre edilerek)</p>	<p>Dosaj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıma göre haftada bir veya iki sefer kullanılır. Gerekli görüldüğünde AlproJet-W her gün de kullanılabilir. %5 oranında solüsyon hazırlayarak kullanınız. Solüsyonu çalkaladıktan sonra aspirasyon tüplerinin içine uygulayınız ve kreşuar çanağına boşaltınız. <p>Çevre Uyumluluğu</p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproJet-W low veya oksijen-splinter ve aldehit ve fenol içermez. OECD kurallarına göre biyolojik olarak çözülebilir. 															
<p>AlproJet-DD Aspirasyon Dezenfektanı Günlük</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Aspirasyon ve separatör sistemleri için günlük bakım, temizlik ve dezenfeksiyon konsantre sıvısıdır.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakterisidal • Fungisidal • RKI ya uygun olarak Virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV, enfluenza bununla beraber Adeno gibi sarılı olmayan virüsler dahil) • VAH/DGDM tarafından sertifikalıdır. EN standartlarına uygundur 	<p>Dosaj</p> <ul style="list-style-type: none"> • %2 oranında AlproJet-DD karıştırılmış solüsyon hazırlayınız. 1-2 sefer çalkaladıktan sonra aspirasyon tüplerinin içine uygulayın ve kreşuar çanağına dökünüz. Solüsyonun etki etmesini bekledikten sonra kullanmadan önce iyice su ile iyice çalkalayınız. <p>Kontakt Süreleri</p> <table border="1"> <tr><td>• Bakterisidal/fungisidal</td><td>%2</td><td>60 dk</td></tr> <tr><td>• Virüsidal HBV</td><td>%2</td><td>15 dk</td></tr> <tr><td>• HVC/BVDV</td><td>%2</td><td>10 dk</td></tr> <tr><td>• Vaccinia</td><td>%2</td><td>5 dk</td></tr> <tr><td>• Adeno</td><td>%2</td><td>15 dk</td></tr> </table> <p>Çevre Uyumluluğu</p> <p>Kendi aralarında mükemmel bir şekilde harmonize olan aktif maddeler özellikle materyallerle uyumludur.</p>	• Bakterisidal/fungisidal	%2	60 dk	• Virüsidal HBV	%2	15 dk	• HVC/BVDV	%2	10 dk	• Vaccinia	%2	5 dk	• Adeno	%2	15 dk
• Bakterisidal/fungisidal	%2	60 dk																
• Virüsidal HBV	%2	15 dk																
• HVC/BVDV	%2	10 dk																
• Vaccinia	%2	5 dk																
• Adeno	%2	15 dk																

ÖLÇÜ

<p>PrintoSept-ID Ölçü Dezenfektanı</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Her türlü ölçülerin, kullanılmış protezlerin (ölçüyle çalışanlar dahil) dezenfeksiyonunda kullanılan kullanıma hazır solüsyondur.</p>	<p>Etkinlik / Sertifikasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakterisidal • Fungisidal • RKI ya uygun olarak virüsidal (HBV, HCV, HIV ve enfluenza dahil) • VAH/DGDM tarafından sertifikalıdır, EN standartlarına uygundur 	<p>Uygulama</p> <p>Kullanıma hazır solüsyona daldırılarak kullanılır. Tüm Dental ölçüler için uygundur. (aljinat, silikon, poliet, hidrokolid, vs) Ayrıca çalışma protezleri dahil kullanılmış/kullanılan protezler için de uygundur. PrintoSept-ID ayrıca modellerin, sırtma kalıplarının, yedeklerin, vb nin hızlı dezenfeksiyonu için de kullanımına uygundur.</p> <p>Kontakt Süreleri</p> <table border="1"> <tr><td>• Bakterisidal</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• Fungisidal</td><td>1 dk</td></tr> <tr><td>• Tuberculocidal</td><td>5 dk</td></tr> <tr><td>• Virüsidal</td><td>5 dk</td></tr> </table> <p>Kullanım Ömrü</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal kullanımda 1 hafta 	• Bakterisidal	1 dk	• Fungisidal	1 dk	• Tuberculocidal	5 dk	• Virüsidal	5 dk
• Bakterisidal	1 dk										
• Fungisidal	1 dk										
• Tuberculocidal	5 dk										
• Virüsidal	5 dk										
<p>AlproSol Ölçü Alet Temizleme Konsantresi</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Ölçü Kaşığından ve el aletlerinden ölçü temizleme konsantre sıvısıdır.</p>	<p>Dosaj</p> <p>1 litre suya %3-5 oranında AlproSol dökünüz ve çalkalayınız. Ölçü kaşıkları ve el aletlerini bir miktar temizledikten sonra (kaba temizliğinden sonra) bir gece boyunca solüsyon içerisinde bırakınız.</p>	<p>Uygulama</p> <p>Ölçü kaşıkları ve aletlerin temizlenmesinde kullanılır. AlproSol; zinc oxide, ojenol, karboksilat,phospote, cam iyonomer simanlar, adhesiz varnişleri ve ölçüleri temizlediği gibi aletlerden, ölçü kaşıklarından, karıştırma spatüllerinden temizler.</p> <p>Ultrasonik Temizlik</p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproSol Ultrasonik cihazlarla da kullanılabilir. 								
<p>TarClean Tartar Siman Sökücü</p>  <p>Aldehit ve fenol içermez</p>	<p>Tedavi ve Dental aletlerinden tartar/simanları çıkartmak için kullanılan asit likit konsantresidir. Geçici Dental dolguları, metal oksitleri ve birçok matertali söker.</p>	<p>Dosaj</p> <ul style="list-style-type: none"> • %10-20 oranında su ile karıştırınız. Ultrasonik cihazlar için ve minör uygulamalar için %5 kullanınız. Daha sonra aletleri su ile durulayınız. 	<p>Uyumluluk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paslanmaz çelik, kıymetli metaller, plastik ve alüminyum malzeme uygundur. 								

